



GUÍA PARA EL PACIENTE

Frecuencia de drenaje:

Frecuencia de vendaje:

- ☐ En cada drenaje
- ☐ En drenaje semanal
- ☐ Otra _____

**Información de
contacto del médico**

Dr. _____

Teléfono: _____

DRENAJE DEL PECHO

Espacio pleural

Sitio de inserción


Manguito

Sitio de salida

Catéter

Válvula

Conector

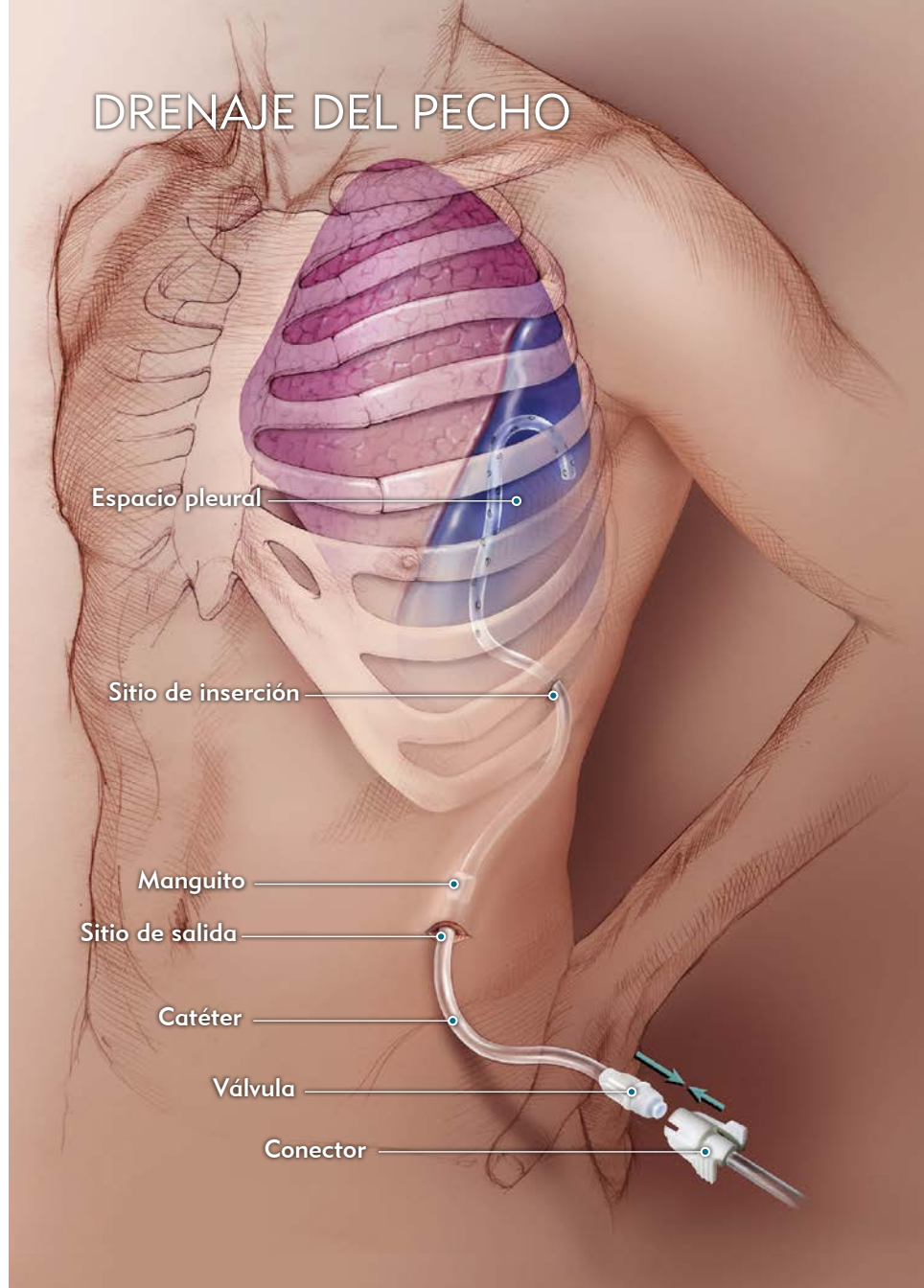

CONTENIDO

Información general sobre el catéter de drenaje Aspira®	4
Cómo drenar líquido desde el catéter de drenaje Aspira	6
Cómo mantener y vendar el catéter de drenaje Aspira	16
Cómo desechar el líquido y los implementos usados	22
Posibles problemas	24
Preguntas frecuentes	27
Glosario	29
Registro de drenajes	30

ADVERTENCIA: Revise los envases por daños antes de abrirlos.
No utilizar si el envase está dañado.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CATÉTER DE DRENAJE ASPIRA®

¿Por qué tiene un catéter de drenaje Aspira?

Su médico le ha colocado un catéter de drenaje Aspira en el pecho o en el abdomen para drenar líquido de esas áreas. El catéter le permite drenar el líquido en casa. Drenar el líquido puede ayudar a prevenir o a reducir la dificultad para respirar u otros síntomas.

¿Dónde entra el catéter al cuerpo?

Revise las ilustraciones interiores de la portada y contraportada. Es posible que su médico le haya colocado el catéter en el pecho (espacio pleural) o en el abdomen (cavidad peritoneal). El médico le realizó una pequeña incisión (sitio de inserción) en el pecho o en la pared abdominal. El médico tunelizó el catéter a través del sitio de inserción, debajo de la piel, hasta llegar al lugar en el que el catéter sale de su cuerpo por medio de otra pequeña incisión (sitio de salida). Es posible que le coloquen puntos en el sitio de la inserción y en el sitio de salida. Deberá limpiar el sitio de salida cada vez que se cambie el vendaje del catéter.

¿Cómo funcionan el catéter de drenaje Aspira y el kit de drenaje Aspira?

El catéter de drenaje Aspira es un tubo de silicona flexible. Este tubo tiene varios agujeros en un extremo. Ese extremo se encuentra dentro de su cuerpo. El líquido ingresa a través de los agujeros y fluye hacia el catéter. En el otro extremo, hay una válvula.

Cuando conecta la bolsa o la botella de drenaje Aspira al catéter, la válvula se abre. Para conocer detalles sobre el drenaje con la bolsa o la botella, consulte las páginas 9 u 11.

Una vez que ya no fluya más líquido hacia la bolsa o botella de drenaje o que esta se llene, desengánchela del catéter. Vacíe la bolsa o botella de drenaje en el excusado y colóquela en la basura.

No reutilizar. No la coloque en la bandeja de reciclaje.

Es importante que sepa cómo drenar y mantener su catéter. Su médico o el personal de enfermería deben haberle entregado instrucciones paso a paso personalizadas. La información de este folleto solamente sirve de referencia. Llame a su médico o al personal de enfermería si todavía tiene preguntas después de haber leído esta guía. También puede ver un video que contiene instrucciones paso a paso sobre cómo drenar y mantener el catéter en www.myaspira.com o llamar al Servicio de Atención al Cliente.

CÓMO DRENAR LÍQUIDO DESDE EL CATÉTER DE DRENAJE ASPIRA

Paso 1 Preparar el área de trabajo.

- a. Desocupe un espacio en una mesa o mueble para colocar los implementos de drenaje.
- b. Limpie la superficie con un pañito desinfectante o con una toalla de papel limpia impregnada con alcohol líquido. Seque la superficie con una toalla de papel seca o deje que se seque por sí sola. Así se creará un área de trabajo limpia.

NOTA: La humedad, los pañitos desinfectantes o el alcohol líquido pueden dañar las superficies de algunos muebles.

- c. Lávese las manos con agua jabonosa tibia. Frótese las manos durante todo un minuto. Enjuáguese las manos. Séquese las manos con una toalla de tela o de papel limpia.
- d. Abra la bolsa que contiene el kit de drenaje.
- e. Coloque los implementos en el área limpia.

PRECAUCIÓN: No drene más de 1000 ml del pecho o más de 2000 ml del abdomen en una sola sesión de drenaje. Siempre siga los consejos de su médico.

PRECAUCIÓN: Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, finalice el drenaje y póngase en contacto con su médico.


- Dificultad para respirar que no se alivia después de drenar 1000 ml del pecho o 2000 ml del abdomen de una sola vez.
- Dolor o dificultad para respirar continuos, pese a que se drena poco o nada de líquido desde el catéter.

- Se drenan menos de 25 a 50 ml en 3 procedimientos de drenaje consecutivos.
- El aspecto del líquido cambia considerablemente entre drenajes. Presenta fiebre (temperatura corporal superior a los 38 °C [100,5 °F]), nota enrojecimiento, hinchazón, supuración o siente dolor en el sitio de salida. Es posible que estos sean signos de una infección que pueda requerir tratamiento. Consulte a su médico de inmediato.

Retire el vendaje SOLAMENTE si:

- 1 Ha transcurrido una semana desde que cambió el vendaje.
- O -
- 2 Su médico le recomendó que se cambiara el vendaje cada vez que drene el líquido.
- O -
- 3 El área debajo del vendaje está húmeda.


NOTA: Si el catéter está dañado, coloque la pinza deslizante (incluida en el kit de drenaje) entre la parte dañada del catéter y el sitio de salida. Póngase en contacto con su médico. Para prevenir daños, no utilice objetos afilados que puedan perforar, cortar o dañar el catéter.

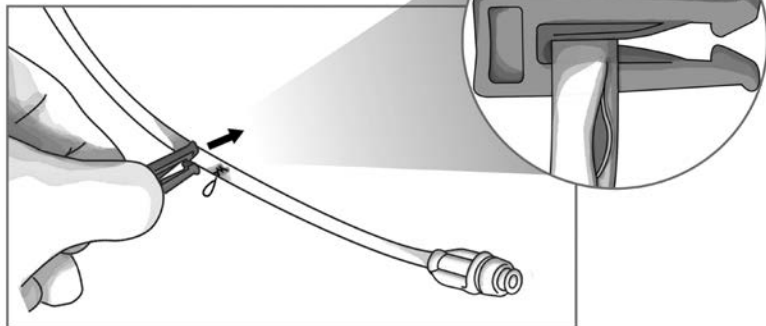

- f. Lávese las manos con agua jabonosa tibia. Frótese las manos durante todo un minuto. Enjuáguese las manos. Séquese las manos con una toalla de tela o de papel limpia.

NOTA: Si el catéter está adherido a la piel con tiras de cinta adhesiva, desprenda la cinta.

- g. Extraiga y deseche la tapa de la válvula del catéter.

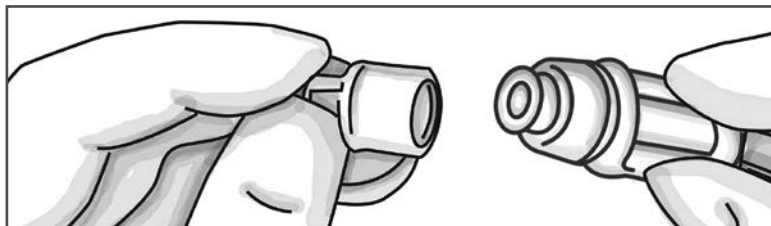

Paso 2 Drenar el líquido

NOTA: El kit de drenaje Aspira viene con una bolsa o botella de drenaje.







Instrucciones para utilizar una bolsa de drenaje.

NOTA: Si utiliza una botella de drenaje, consulte las instrucciones para utilizar una botella de drenaje que se encuentran en la página 11.

- Limpie el extremo de la válvula del catéter con un apósito con alcohol. (1)
- Levante el extremo de conexión de la línea de la bolsa de drenaje y empujelo hasta el final del catéter, hasta oír o sentir un clic. (2) Tire suavemente de la línea de drenaje para comprobar que la conexión esté fija.
- Coloque la bolsa en una superficie plana a una distancia mínima de un brazo **por debajo del pecho o el abdomen**. (3)
- Apriete suavemente la bomba de sifón una vez para iniciar el flujo. Se reexpandirá de forma paulatina, a medida que el líquido llene la bomba. Deje que el líquido se drene hasta que la bolsa se llene, o bien hasta que el líquido deje de fluir. (4)

NOTA: Si la bomba no se reexpande, o se reexpande, pero no se llena de líquido, verifique la conexión. Apriete suavemente la bomba una vez más. Si no funciona, inténtelo de nuevo con un kit de drenaje nuevo. Si el flujo no inicia con un nuevo kit de drenaje, póngase en contacto con su médico.

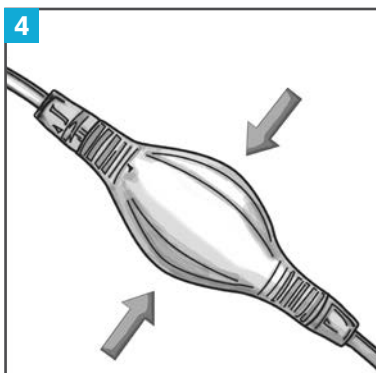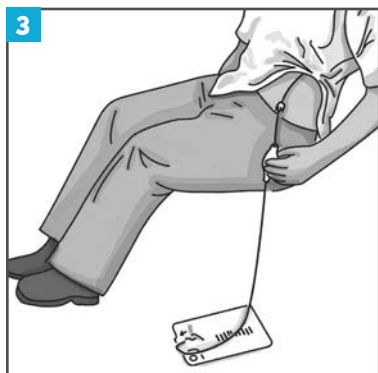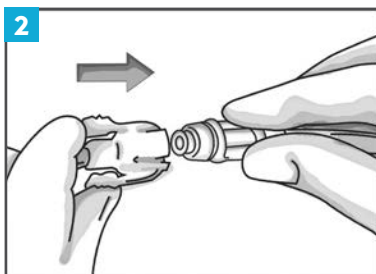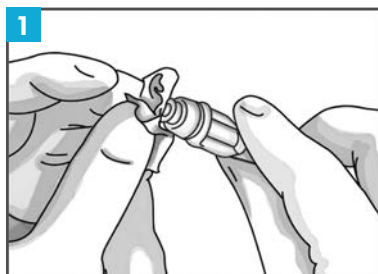

NOTA: Si siente dolor durante el drenaje, levante la bolsa para ralentizar el líquido o desconecte la bolsa para detener el flujo de líquido. Si desconecta la bolsa, coloque el extremo de conexión en el área de trabajo limpia. Para reanudar el flujo de líquido, limpie la válvula con una nueva toallita con alcohol, conecte la bolsa al catéter y apriete suavemente la bomba. No vuelva a conectar una bolsa usada que haya permanecido desconectada durante más de 30 minutos.

Instrucciones para utilizar una botella de drenaje.




NOTA: Si utiliza una bolsa de drenaje, consulte las instrucciones para utilizar una bolsa de drenaje que se encuentran en la página 9.

- a. Limpie el extremo de la válvula del catéter con un apósito con alcohol. (1)
- b. Levante el extremo de conexión de la línea de la botella de drenaje y empújelo hasta el final del catéter, hasta oír o sentir un clic. (2) Tire suavemente de la línea de drenaje para comprobar que la conexión esté fija.
- c. Coloque la botella en posición vertical sobre una superficie plana, dejando un acceso al mango de la botella. (3)
- d. Para abrir la botella, gire el mango hacia la izquierda hasta que la flecha del mango quede alineada con el tubo (aproximadamente, media vuelta). Deje que el líquido se drene hasta que la botella se llene, o bien hasta que el líquido deje de fluir. (4)


PRECAUCIÓN: Mientras la botella está conectada al catéter, no gire el mango más allá del punto de alineación de la flecha del mango con el tubo (aproximadamente, media vuelta) hasta que esté listo para vaciar la botella. Si el mango se gira en exceso mientras está conectado al catéter, el aire podría entrar al sistema y provocar neumotórax. Si entra aire al sistema, desconecte el tubo del catéter y utilice otra botella.

NOTA: Al girar el mango, es posible que se sienta un golpe. Esta es una indicación para dejar de girar el mango hasta que esté listo para quitarlo por completo. No gire el mango más allá de esta función hasta que la botella se haya desconectado del catéter y usted esté listo para vaciar el contenido de la botella.

NOTA: Si la botella no se llena con líquido, ciérrela girando el mango hacia la derecha hasta que se detenga (aproximadamente, media vuelta). Revise la conexión y asegúrese de que no haya torceduras en la línea de drenaje. Asegúrese de que la abrazadera de rodillo esté abierta y que el tubo no esté torcido. Gire el mango hacia la izquierda hasta que la flecha del mango quede alineada con el tubo (aproximadamente, media vuelta). Si no funciona, inténtelo de nuevo con un kit de drenaje nuevo. Si el flujo no inicia con un nuevo kit de drenaje, póngase en contacto con su médico.

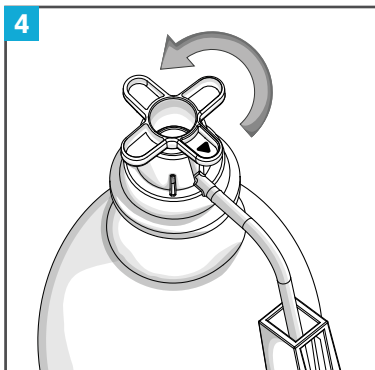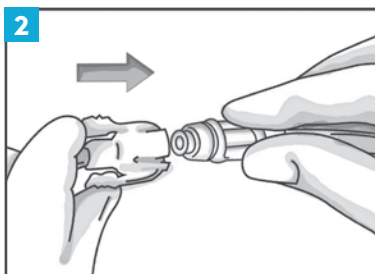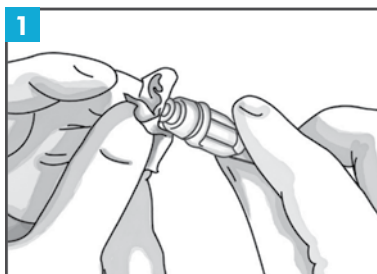


NOTA: Si siente dolor durante el drenaje, ajuste el rodillo en el tubo para apretar el tubo hacia abajo y ralentizar el drenaje o cerrar la botella para detener el flujo de líquido.

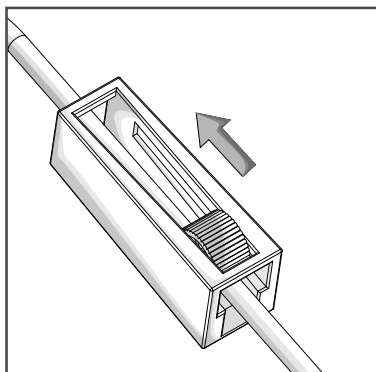


NOTA: Si desconecta la botella, asegúrese de cerrarla antes de retirar la línea de drenaje del catéter. Coloque el extremo de conexión en el área de trabajo limpia. Para reanudar el flujo de líquido, limpie la válvula con una nueva toallita con alcohol, conecte la botella al catéter y abra la botella. No vuelva a conectar una botella usada que haya permanecido desconectada durante más de 30 minutos.

Paso 3 Finalizar el drenaje


- a.** Cuando el líquido deje de fluir o la bolsa o botella se llene, sostenga el catéter con una mano y apriete las alas del conector con la otra hasta que este se salga fácilmente del catéter.

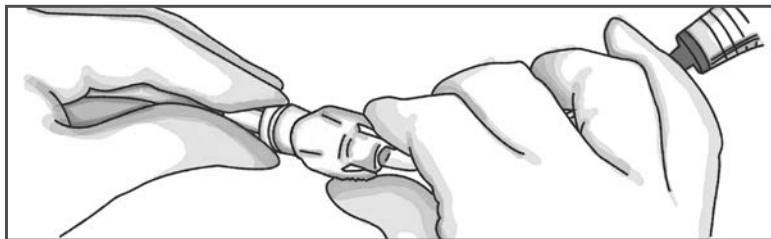

- b.** Permita que cualquier líquido que quede en el tubo se drene a la bolsa o botella. Coloque la bolsa o botella a un lado.
- c.** Limpie la válvula del catéter con un nuevo apósito con alcohol.

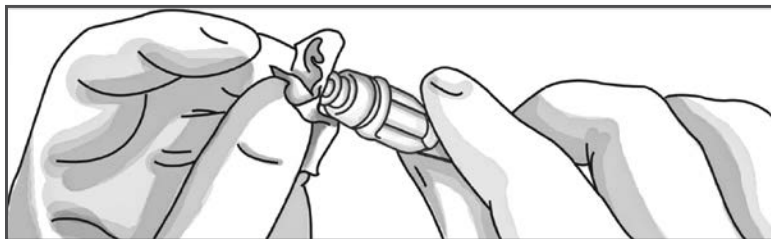

d. Coloque una tapa de válvula nueva en la válvula del catéter.

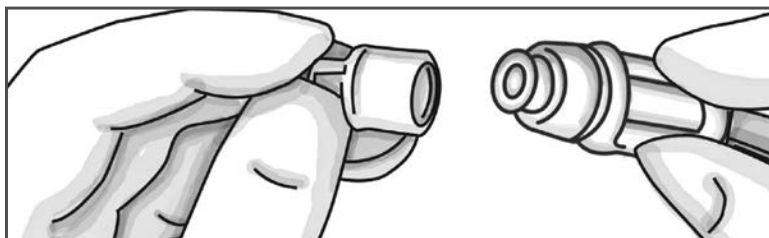

e. Opcional: Si no es momento de cambiarse el vendaje, adhiera el catéter a la piel con cinta donde le resulte más cómodo. Diríjase a la sección titulada "Cómo desechar el líquido y los implementos usados" en la página 22.

NOTA: Si ya es momento de cambiarse el vendaje, diríjase a la sección titulada "Cómo mantener y vendar el catéter de drenaje Aspira" en la página 16.

CÓMO MANTENER Y VENDAR EL CATÉTER DE DRENAJE ASPIRA


Debe cambiarse el vendaje al menos **una vez a la semana** o con la frecuencia que le haya indicado su médico o el personal de enfermería. Asimismo, usted deberá cambiar el vendaje si el área debajo del vendaje transparente se humedece.

NOTA: Si utiliza una bolsa de drenaje, el kit de drenaje y los artículos que se indican a continuación se proporcionan en empaques separados. Si utiliza una botella de drenaje, se incluyen los siguientes artículos en el kit de drenaje mencionado en la página 9.



- a. Retire cuidadosamente el vendaje transparente, la gasa y el apósito fenestrado del catéter.

NOTA: Si el catéter está dañado, coloque la pinza deslizante, incluida en el kit de drenaje, entre la parte dañada del catéter y el sitio de salida y comuníquese con su médico. Para prevenir daños, no utilice objetos afilados que puedan perforar, cortar o dañar el catéter.

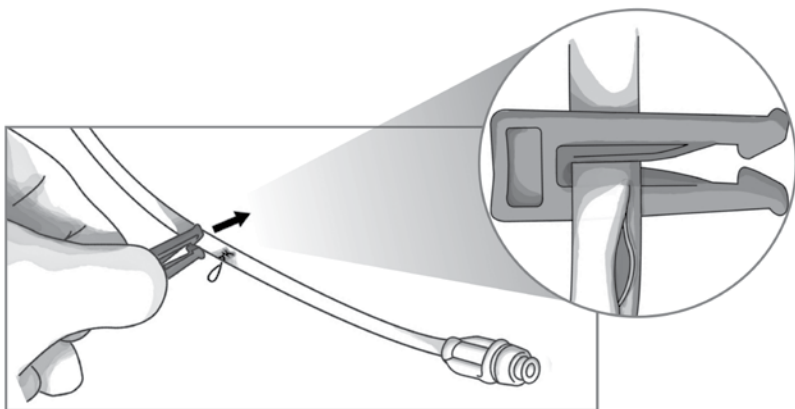

b. Lávese las manos con agua jabonosa tibia. Frótese las manos durante todo un minuto. Enjuáguese las manos. Séquese las manos con una toalla de tela o de papel limpia.


c. Abra la bolsa que contiene el kit de vendaje.

NOTA: No toque con los guantes ninguna superficie que no esté limpia, como su piel, su ropa o los muebles.

d. Extraiga los guantes de la bolsa.

e. Tome un guante por el extremo doblado y colóqueselo en la mano. Tome el segundo guante con la mano enguantada y colóqueselo en la otra mano.

f. Retire el envoltorio CSR de color azul de la bolsa y colóquelo en el área de trabajo limpia. Tome la esquina doblada en la orilla de la manta para abrirla.

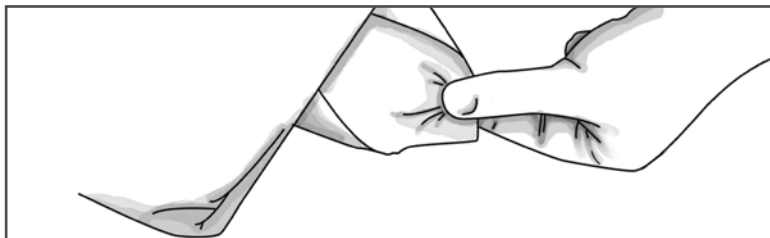

- g. Aplane la manta para que pueda ver los implementos de vendaje.
- h. Limpie la piel alrededor del sitio de salida del catéter con un apósito con alcohol.




PRECAUCIÓN: Si presenta fiebre (temperatura corporal superior a los 38 °C [100,5 °F]), nota enrojecimiento, hinchazón, supuración o siente dolor en el sitio de salida, es posible que estos sean signos de una infección que puede requerir tratamiento. Consulte a su médico de inmediato.


NOTA: Asegúrese de que tanto el sitio de salida como la piel alrededor del catéter estén secos antes de completar el vendaje.

- i. Coloque el apósito fenestrado del catéter sobre la piel alrededor del catéter.
- j. Si se cambia el vendaje cada vez que realiza el drenaje, enrolle el catéter encima del apósito. Si se cambia el vendaje con menor frecuencia de lo que realiza el drenaje, oriente el catéter hacia abajo, en dirección a la cintura.

Vendarse en cada drenaje

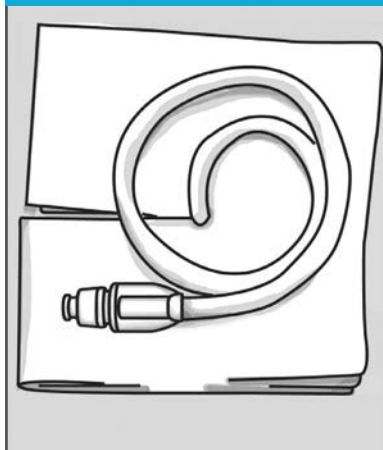


Vendarse con menor frecuencia

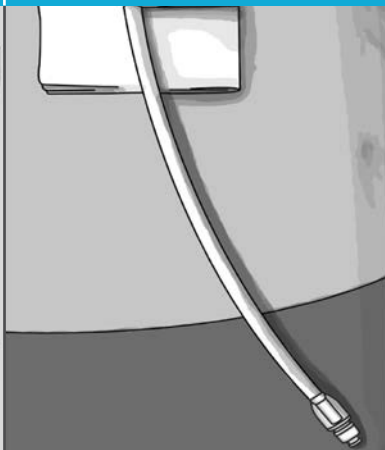

k. Coloque la gasa sobre la punta del catéter.

Vendarse en cada drenaje

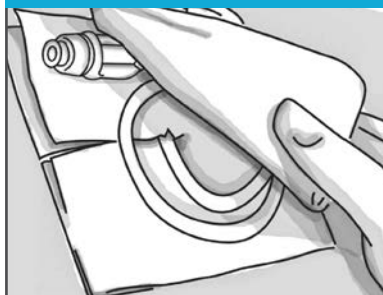

Vendarse con menor frecuencia



- I. Coloque la gasa, el catéter y el apósito fenestrado en el lugar correspondiente con una mano.


NOTA: Para el próximo paso, puede necesitar la ayuda de un cuidador. Asegúrese de que el cuidador se lave las manos, frotándoselas durante todo un minuto, y de que se seque las manos con una toalla de tela o de papel limpia antes de ayudarlo a vendar el sitio de salida.

- m. Retire el rectángulo interior del vendaje y, después, retire la lámina protectora impresa. Coloque el vendaje transparente sobre el catéter y la gasa. Asegúrese de que el vendaje se adhiera a la piel alrededor de la gasa. Retire el extremo de papel del vendaje y empareje los extremos. Tenga cuidado, el vendaje transparente es muy pegajoso.



NOTA: Si se cambia el vendaje cada vez que drena el líquido, ya ha finalizado el vendaje. Se puede desechar cualquier implemento sobrante. Puede dirigirse a la sección titulada “Cómo desechar el líquido y los implementos usados” que se encuentra en la página 22. Si se venda el catéter con menor frecuencia, siga estos pasos finales antes de pasar a la sección siguiente.

- n. Si el catéter quedó colgando hacia abajo, adhiera con cinta el resto del catéter a la piel donde le resulte más cómodo.

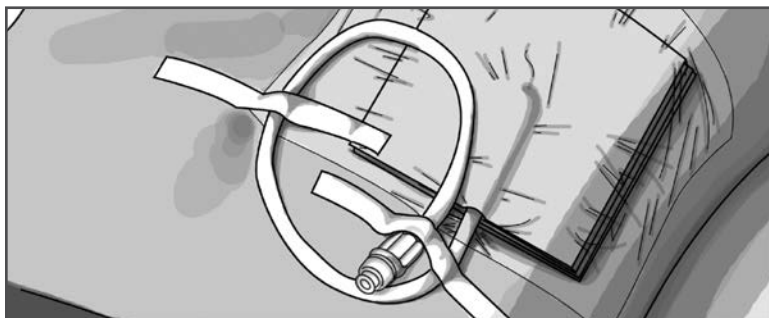


CÓMO DESECHAR EL LÍQUIDO Y LOS IMPLEMENTOS USADOS

PRECAUCIÓN: Si se derrama el líquido, asegúrese de utilizar agua tibia y jabón para limpiar la ropa y la piel, y blanqueador para limpiar artículos del hogar.


NOTA: No coloque la bolsa o la botella de drenaje Aspira usada en la bandeja de reciclaje.

NOTA: El Paso a corresponde a la bolsa de drenaje y el Paso b corresponde a la botella de drenaje. Todos los demás pasos se aplican a la bolsa y a la botella.

- a. Mientras la sostiene sobre el excusado, corte o abra la esquina de la bolsa de drenaje en la dirección a la que apunta la flecha que indica "corte o abra aquí para vaciar".

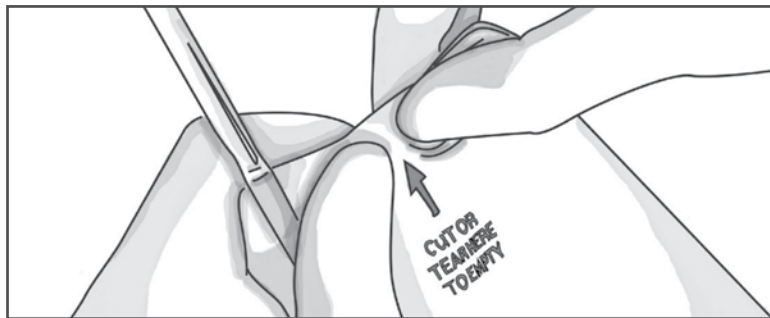

- b. Mientras la sostiene sobre el excusado, gire el mango hacia la izquierda hasta que se separe de la botella (aproximadamente, dos vueltas completas).

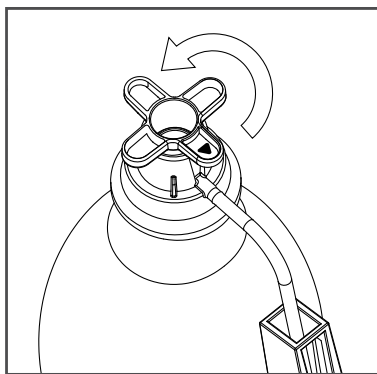

- c.** Vacíe el líquido en el excusado. Descargue el agua del excusado.
- d.** Enrolle la línea de drenaje alrededor de la bolsa o botella de drenaje vacía. Colóquela en una bolsa de plástico pequeña y deséchela.
- e.** Deseche todos los demás implementos usados en la basura.
- f.** Lávese las manos con agua jabonosa tibia. Enjuáguese las manos.

POSIBLES PROBLEMAS

Infección		
Signos:	Qué hacer:	Medidas de prevención:
Si presenta fiebre (temperatura corporal superior a los 38 °C [100,5 °F]), nota enrojecimiento, hinchazón o supuración, o siente dolor en el sitio de salida. Es posible que estos sean signos de una infección que pueda requerir tratamiento.	Llame a su médico de inmediato.	Limpie el sitio de salida con frecuencia. Siga las instrucciones de este folleto para realizar un procedimiento limpio siempre que vaya a tener acceso al catéter.

Dolor durante el drenaje del líquido		
Signos:	Qué hacer:	Medidas de prevención:
Dolor mientras drena el líquido con la bolsa de drenaje Aspira.	<ul style="list-style-type: none"> • Si siente dolor durante el drenaje, levante la bolsa para ralentizar el flujo. • Desconecte la bolsa para detener el flujo. Si el dolor no desaparece una vez que ha detenido el drenaje, póngase en contacto con su médico. 	No drene más líquido del que su médico le haya indicado para cada drenaje.
Dolor mientras drena el líquido con la botella de drenaje Aspira.	Si siente dolor durante el drenaje, ajuste el rodillo en el tubo para apretar el tubo. También puede girar el mango hacia la derecha (aproximadamente, media vuelta) para cerrar la botella. Una vez que el dolor haya desaparecido, reanude el drenaje.	No drene más líquido del que su médico le haya indicado para cada drenaje. Utilice la abrazadera de rodillo en el tubo para disminuir la velocidad de drenaje.

Drenaje lento o ausencia de drenaje

Signos:	Qué hacer:	Medidas de prevención:
Incapacidad de drenar el líquido o se drena muy poco líquido durante los procedimientos.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la bolsa esté colocada a una distancia mínima de un brazo por debajo del pecho o el abdomen. • Asegúrese de que la línea de drenaje y el catéter no estén torcidos. • Asegúrese de que el catéter y la línea de drenaje estén firmemente conectados. • Asegúrese de que la abrazadera de rodillo esté completamente abierta en la línea de drenaje de la botella. • Apriete suavemente la bomba una vez más para iniciar el flujo del líquido. • Intente cambiar su posición corporal. Si el flujo del líquido no mejora, llame a su médico. Puede que sea necesario revisar el catéter. 	Un drenaje lento o la ausencia de drenaje pueden deberse a muchos factores, la mayoría de los cuales están fuera de su control. Llame a su médico.

Rotura o corte accidental del catéter

Signos:	Qué hacer:	Medidas de prevención:
Fugas de líquido	Coloque la pinza deslizante entre el área dañada y su piel. Llame a su médico de inmediato. Su médico deberá reparar el catéter.	No utilice objetos afilados alrededor del catéter. Nunca aplique mucha fuerza en el catéter.

Daño a la válvula del catéter

Signos:	Qué hacer:	Medidas de prevención:
Fugas de líquido alrededor de la válvula del catéter.	Coloque la pinza deslizante suministrada cerca de la válvula del catéter. Llame a su médico. Será necesario reemplazar la válvula del catéter.	No aplique mucha fuerza en la válvula del catéter o en el catéter cuando conecte y retire la bolsa o botella de drenaje Aspira. No intente conectar otra cosa que no sea la bolsa o botella de drenaje a la válvula del catéter.

Retiro accidental del catéter

Signos:	Qué hacer:	Medidas de prevención:
El catéter se mueve hacia dentro y fuera del sitio de salida. Es posible que el manguito traspase la piel.	Llame a su médico de inmediato. Si el catéter se le sale por completo del pecho o el abdomen, coloque un vendaje limpio en el sitio de salida.	No tire ni hale del catéter. Tenga cuidado de que no se enganche ni se quede atrapado.

Presión arterial baja durante o después del drenaje

Signos:	Qué hacer:	Medidas de prevención:
Mareos o sensación de aturdimiento, visión borrosa, sensación de desmayos o debilidad.	Detenga el drenaje. Llame a su médico.	No drene más líquido del que su médico le haya indicado durante cada drenaje.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo ducharme con el catéter?

Puede ducharse si se coloca una cubierta hermética de forma fija sobre el catéter. No tome un baño ni permita que el catéter o el sitio de salida del catéter se remojen bajo el agua. Si se humedece el área debajo del vendaje transparente, retire el vendaje y seque y vende el área con un nuevo kit de vendaje.

¿Qué tan seguido debo drenar el líquido?

Debe drenar el líquido con la frecuencia indicada por su médico. Es posible que su médico le indique que drene el líquido para aliviar síntomas.

¿Por cuánto tiempo se coloca el catéter?

Su médico decidirá por cuánto tiempo va a necesitar el catéter. Puede permanecer en su lugar por el tiempo que sea necesario, siempre que usted no experimente complicaciones.

¿Qué tan seguido debo cambiar el vendaje?

Debe cambiar el vendaje al menos una vez a la semana o con la frecuencia que le haya indicado su médico. También debe aplicar un vendaje limpio si se humedece el área debajo del vendaje transparente o si el vendaje transparente sufre algún daño. Consulte "Cómo mantener y vendar el catéter de drenaje Aspira" en la página 16.

Desde luego, esta guía para el paciente no puede abordar todos los posibles casos, situaciones o preguntas.

Póngase en contacto con su médico si tiene preguntas o inquietudes.

¿Qué productos debo pedir para realizar el drenaje en casa?

Pacientes que viven en la zona horaria del este:	Pacientes que viven fuera de la zona horaria del este:
Complete Medical Supplies Teléfono: 866-748-5151 Fax: 866-634-8166	180 Medical Teléfono: 877-688-2729 Fax: 888-718-0633

NÚMEROS PARA VOLVER A REALIZAR PEDIDOS

Bolsa de drenaje de 1 l	Kit de vendaje
4992301	4991503
Botella de drenaje de 1 l/kit de vendaje	
ASP-10	

¿A quién debo llamar si tengo preguntas sobre el catéter?

Si tiene preguntas generales sobre cómo utilizar el catéter, puede llamar a la línea de información clínica sin costo alguno al 1-833-3ASPIRA (327-7472). También puede llamar a su médico o enfermero.

¿Dónde puedo encontrar un video que explique cómo debo mantener y drenar líquido desde el catéter de drenaje Aspira?

Si su médico o enfermero no le proporcionaron un DVD, puede encontrar el video de drenaje para el paciente en www.myaspira.com o llamar sin costo alguno al Servicio de Atención al Cliente al 1-800-356-3748 para solicitar un DVD.

Descargo: Todas las respuestas proporcionadas son sugerencias y solo su médico puede tomar las decisiones adecuadas con base en su situación clínica y necesidades particulares. Los consejos de su médico reemplazan cualquier recomendación que se brinda en esta guía para el paciente.

GLOSARIO

Ascitis Líquido que se acumula en el abdomen.

Catéter Tubo de silicona (plástico) flexible que se coloca dentro del cuerpo.

Manguito Pequeña pieza de malla que rodea el catéter y ayuda a que este permanezca en su lugar mientras está dentro del cuerpo.

Sitio de salida Pequeña incisión por donde el catéter sale de la piel.

Sitio de inserción Pequeña incisión donde el médico inserta el catéter.

Espacio peritoneal Espacio que rodea a los órganos abdominales donde es posible que se acumule líquido.

Peritoneo Membrana que recubre el interior del abdomen y rodea los órganos abdominales.

Derrame pleural Líquido que se acumula en el espacio pleural.

Espacio pleural Área que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica donde es posible que se acumule líquido.

REGISTRO DE DRENAJES

[illegible]



NÚMEROS PARA VOLVER A REALIZAR PEDIDOS

Bolsa de drenaje de 1 l

4992301


Kit de vendaje

4991503

Botella de drenaje de 1 l/kit de vendaje

ASP-10

DRENAJE DEL ABDOMEN

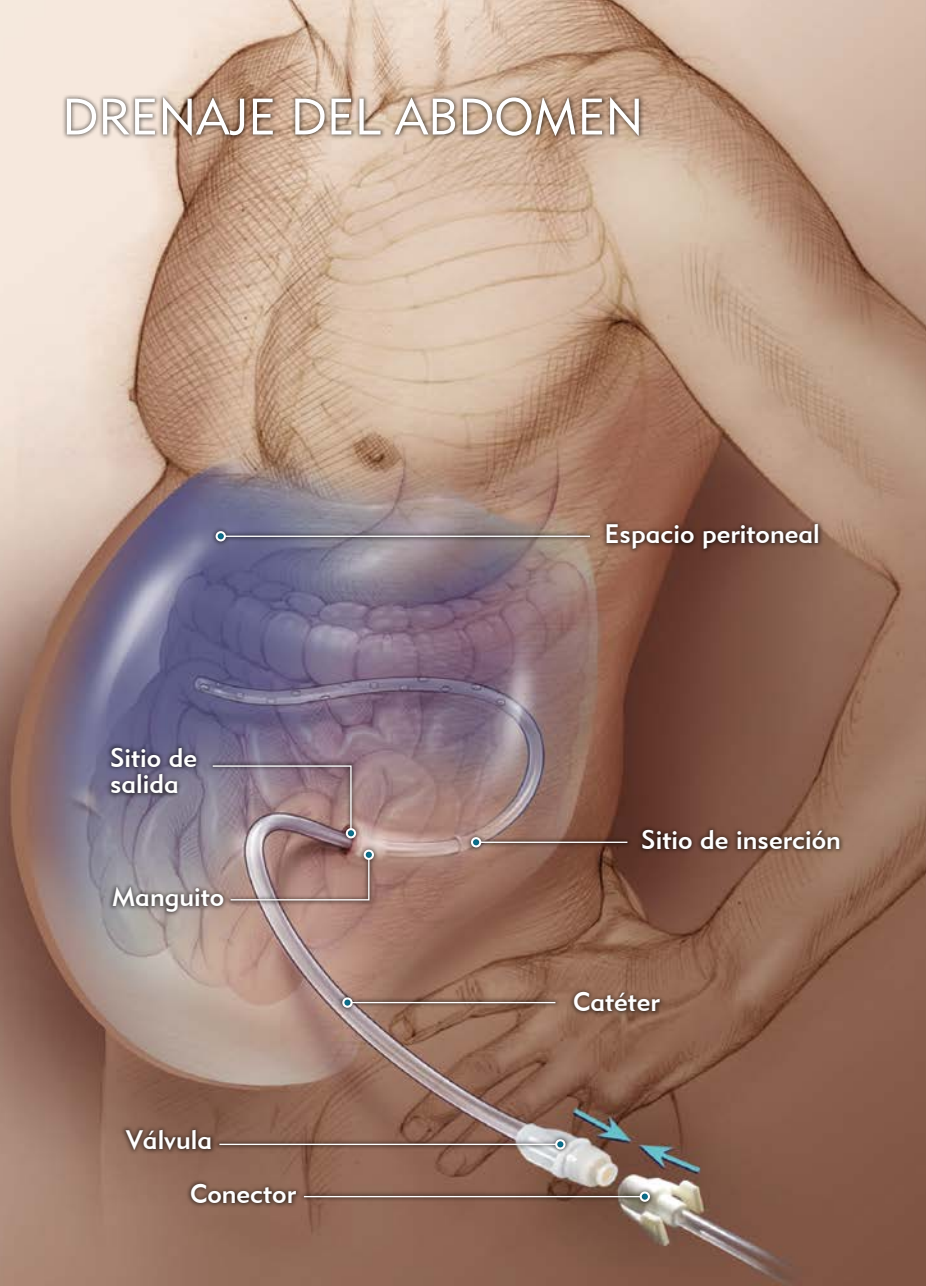



Para obtener más información, escanee el código QR o visite el sitio web myaspira.com.

401152002_002 ID 101321