

# Osseoflex® SN

## Aguja dirigida

El refuerzo vertebral con los dispositivos de Merit es un procedimiento mínimamente invasivo que combina una navegación sin precedentes del cuerpo vertebral con cemento óseo viscoso para el tratamiento preciso de fracturas vertebrales sintomáticas por compresión.

La aguja dirigida y articulada Osseoflex® SN ofrece acceso directo a todo el cuerpo vertebral con un método monopedicular para el refuerzo vertebral percutáneo.

La creación de cavidades se consigue mediante la escisión de hueso dirigiendo o articulando la aguja Osseoflex SN con el objeto de crear uno o varios canales.

Una vez escindido el hueso, se inyecta cemento óseo polimérico con la aguja dirigida Osseoflex para rellenar el hueco.



### INDICADOR DE CURVA DE ACCIONAMIENTO



- El indicador de accionamiento proporciona al médico una confirmación visual en relación con el grado de articulación de la aguja en el interior del cuerpo vertebral.
- Cuando está parcialmente articulada (30-45°), parte del marcador amarillo es visible en la ventana del indicador. Cuando está completamente articulada (90°), el marcador amarillo ocupa toda la ventana del indicador.

El mango de la aguja Osseoflex SN, de diseño ergonómico, permite al médico controlar la dirección y la articulación de la aguja de administración.

La aguja dirigida Osseoflex es compatible con el calibre 10

### RANGO DE MOVIMIENTO DINÁMICO DE LA AGUJA DIRIGIBLE OSSEOFLEX SN



# Preferential Path. Targeted Delivery.™

## AGUJA DIRIGIBLE OSSEOFLEX SN (CALIBRE 10)

Referencia	Descripción	Contenido
<b>OF-0020</b>	Aguja dirigida Osseoflex SN (calibre 10)	(1) aguja dirigida compatible con calibre 10 Osseoflex SN, (2) cánulas de calibre 10, (2) estiletes, (1) punta biselada, (1) punta de diamante
<b>OF-0231</b>	Aguja dirigida Osseoflex SN (calibre 10) (solo aguja)	(1) aguja dirigida compatible con calibre 10 Osseoflex SN
<b>OS-0001</b>	Sistema de introducción vertebral para acceso Osseoflex (calibre 10)	(2) cánulas de calibre 10, (2) estiletes

Al igual que casi todos los procedimientos quirúrgicos, la vertebroplastia, la cifoplastia y el refuerzo vertebral comportan algunos riesgos, y algunas de las complicaciones pueden ser graves. Si desea la información completa sobre los riesgos, la contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los episodios adversos, consulte la instrucciones de uso del sistema.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport  
The Netherlands  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Ireland  
+353 (0) 91 703 733

[merit.com](http://merit.com)

Australia  
+61 (0) 3 8373 4943

Austria  
0800 295 374

Belgium  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (Français)

Brazil  
+55 11 4561 - 0062

Canada  
1.800.364.4370

China  
+86-10 8561 0788

Denmark  
80 88 00 24

Finland  
0800 770 586

France  
0800 91 60 30

Germany  
0800 182 0871

Hong Kong  
+852-2207 6888

India  
+91-80-41223376

Ireland (Republic)  
1800 553 163

Italy  
800 897 005

Luxembourg  
8002 25 22

Netherlands  
0800 022 81 84

Norway  
800 11629

Portugal  
308 801 034

Russia  
+7 495 221 89 02

Singapore  
+65 67536311

South Korea  
+8210 2205 0707

España  
+34 911238406

Sweden  
020 792 445

Switzerland  
(Deutsch)  
+41 22 518 02 30  
(Français)  
+41 22 518 02 52

(Italiano)  
+41 22 518 00 35

UK  
0800 973 115