





1. Πιέστε τα άκρα σχήματος V της συσκευής μαζί, για να ευθυγραμμιστούν οι αυλοί.
2. Όταν οι υποδοχείς ευθυγραμμιστούν, αναγάγετε το εγγύς άκρο του οδηγού σύρματος μέσα στη συσκευή.
3. Συνεχίστε να πιέξετε τα άκρα και σύρετε τη συσκευή κατά μήκος του οδηγού σύρματος μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θέση.
4. Σταματήστε να πιέζετε, ώστε να ενεργοποιηστεί τον μηχανισμό σταθεροποίησης.
5. Κρατήστε και περιστρέψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη ραβδωτή επιφάνεια που βρίσκεται στο πίσω μέρος της για να κατευθύνετε το άκρο του οδηγού σύρματος στην επιθυμητή θέση.
6. Για να μετακινήσετε τη συσκευή ροής στρέψης σε μια νέα θέση, πιέστε τα άκρα και σύρετε τη συσκευή κατά μήκος του οδηγού σύρματος μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θέση και έπειτα σταματήστε να πιέζετε.
7. Για να αφαιρέσετε τη συσκευή ροής στρέψης από το οδηγού σύρμα, πιέστε τα άκρα και σύρετε τη συσκευή μέχρι να βγει από το οδηγού σύρμα.