

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 保護栓 70280000

メリット デュアルキャップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

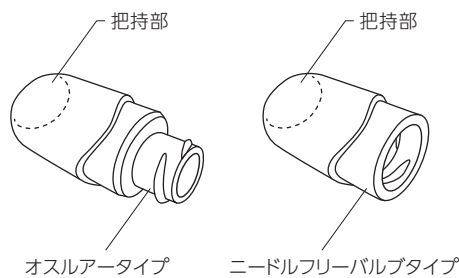

【使用目的又は効果】

本品は輸液セット等の内容物の漏れを防止し、使用するまで内容物の清浄状態を維持するためのプラスチック製の蓋状の器具である。

【使用方法等】

<取り付け>

1. 本品の包装に損傷がないことを確認し、保護のホイルのタブを握り取り外す。
2. オスルアー部又はニードルフリーバルブ部に本品を取り付け時計方向へ回す。

<取り外し>

1. 両手で本品把持部と本品と接続しているコネクタ部を握り、時計と反対方向に本品をねじる。
2. オスルアーコネクタ又はニードルフリーバルブコネクタがカテーテル等に固定されていることを確認する。
3. 施設のプロトコルに従い、本品を破棄する。
4. 輸液ライン等を外し、使用しない場合には、再度本品を接続しておく。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 包装から取り出す際や接続する際には、特に接続部への汚染に注意すること。
2. 必ず両手で取り外し操作すること。[意図せずルアーアクセスバルブが外れる可能性がある]
3. 接続は確実に行い、使用中は緩みがないことを確認すること。
4. 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある]。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 使用直前に開封して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

<有効期間>

製品包装に表示の使用期限を参照。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メリットメディカル・ジャパン株式会社

製造業者：Merit Medical Systems, Inc.

国名：米国