

"美瑞特" 冠狀動脈可控式顯影注射器

"Merit" Coronary Control Syringe

衛署醫器輸字第 012705 號

使用前請詳閱原廠使用說明書並遵照指示使用

產品描述

本產品包含一個校正的中空管插入一個緊密的可移動式活塞和尖端或封口。管身包含一個固定的male luer 連接器或male luer 旋轉轉接器，可與female luer 樞紐相容。

適應症

本產品適用於動脈或靜脈內注射顯影劑。本產品也可用於將液體（除脂性溶劑，如lipidol顯影劑與DMSO)注入體內或從體內抽出液體檢查是否有氣泡或血栓形成。

禁忌症

本產品未有已知的禁忌症。

注意事項

- 使用本產品之前請仔細閱讀使用說明。如本產品要與其他製造商的組件一起使用，請仔細閱讀該產品的使用說明。
- 使用產品時請採用適當的無菌技術。
- 使用前檢查產品，以確保在運輸過程中沒有發生損壞。
- 本產品僅限醫師使用。

警告

- 本產品與油性或脂性的介質不相容，例如 Lipiodol顯影劑、DMSO。使用油性或脂性的溶劑可能會造成本產品的損壞。

重複使用預防聲明

僅供一位患者使用。不要重複使用、重新加工或重新滅菌。重複使用、重複加工或重新滅菌可能會損害產品的結構完整性和/或導致產品故障，進而導致患者受傷、生病或死亡。重複使用、重新加工或重新滅菌也可能造成產品污染和/或引起患者感染或交叉感染，包括但不限於從一名患者到另一名患者的傳染病的傳播。產品的污染可能導致患者受傷、生病或死亡。


使用說明

1. 使用無菌技術，打開內含無菌產品的包裝。
2. 使用前檢查產品，以確保在運輸過程中沒有發生損壞。
3. 使用一隻或兩隻手準備注射器，並將活塞來回抽吸數次，以確保活塞能順暢移動。
4. 填充注射器時請將活塞拉回。
5. 順時針轉動注射器使注射器頭連接到female luer。請勿過度轉緊。不要使用任何器械來轉緊。
6. 注射時，推動注射器活塞，注射適量的液體。

注意：保存期限3年。

保存條件：放置於陰乾處。

110. 2.

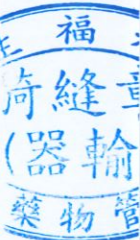

運輸條件：運輸過程中不要暴露在高溫或潮濕的環境中。



僅限單次使用/切勿重複使用



內容物非熱源性



不可重複滅菌



若包裝受損切勿使用

110. 2. 1



產品規格

旋轉式接頭	6ml	8ml	10ml	12ml	20ml
Solid Body Plunger, Ringed Grip		CCS880	CCS800	CCS600	CCS320
Solid Body Plunger, Ringed Grip, Palm Pad			CCSB900	CCSB700	
Solid Body Plunger, Winged Grip, Palm Pad			CCSB910	CCSB710	
Solid Body Plunger, Ringed Grip, Smart Tip			ST800	ST600	ST320
Locking Ring Plunger, Ringed Grip	CCS460			CCS100	
固定式接頭	6ml	8ml	10ml	12ml	20ml
Solid Body Plunger, Ringed Grip		CCS881	CCS801	CCS601	CCS321
Solid Body Plunger, Ringed Grip, Palm Pad			CCSB901	CCSB701	
Solid Body Plunger, Winged Grip, Palm Pad			CCSB911	CCSB711	
Solid Body Plunger, Ringed Grip, Smart Tip			ST801	ST601	ST321
Locking Ring Plunger, Ringed Grip	CCS461			CCS101	

製造廠名稱：Merit Medical Systems, Inc.

製造廠地址：1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095, USA

藥商名稱：香港商美瑞特醫療器材股份有限公司台灣分公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載 (市售品須刊載實際地址)

產品實際照片
CCS460



CCS800



CCSB910



ST800



CCS461



CCS801



CCSB911



ST801

